

产品特性



德湿威24™
TenderWet24®
德湿威™
TenderWet®

交互式伤口清洁敷料，可清洗伤口并快速主动清创长达24小时。



德湿银™
Atrauman®Ag

含银敷料，有强大的杀菌能力，持续作用3-4天，能杀灭所有的致病微生物，无细胞毒性。



德湿肤™
PermaFoam®

泡沫敷料，垂直吸收渗液，吸收速度快，吸收能力强，吸收到中层后扩散，无浸渍。



德湿康™
Sorbalgon®

由藻酸钙纤维制成的纯天然无药物敷料，柔软，可将创面的细菌及组织残屑包裹并锁定在凝胶中，帮助伤口迅速止血，并促进愈合。



德湿可™
Hydrocoll®

水胶体敷料，非常薄，为伤口提供湿润的愈合环境，可以保护促进肉芽组织生长和促进上皮爬行。



德湿舒™
Hydrosorb®

透明的水凝胶敷料，表面覆盖半透膜，阻止细菌穿透。为创面提供湿性环境，促进肉芽和上皮生长，移去时无痛无残余。



伤口敷料选用指南

——各种静脉炎敷料的选用

保赫曼服务信息

服务热线：8008202826

公司网址：<http://www.hartmann.info>

各种静脉炎敷料的选用

静脉炎性质	临床表现	原因	敷料选用	敷料图例
静脉炎预防	<ul style="list-style-type: none"> ● 静脉输液部位刺痛, 发白, 发痒等轻微变化 	<ul style="list-style-type: none"> ● 化疗等药物输注, 需要反复穿刺的静脉, 静脉炎风险的部位保护 	<ul style="list-style-type: none"> ● 德湿可10×10cm ● 每5天左右更换, 如果有渗出敷料发白鼓泡, 需要更换 	
机械性静脉炎	<ul style="list-style-type: none"> ● 沿静脉走行发红、肿胀、疼痛 ● 有时可以表现成局限症状 	<ul style="list-style-type: none"> ● 穿刺、置管过程中穿刺鞘和导管对静脉内膜、静脉瓣机械性摩擦刺激引发变态反应 	<ul style="list-style-type: none"> ● 输液开始时沿静脉走向部位贴德湿可10×10cm ● 输液结束后继续贴用德湿可3-5片, 每5天更换一片 	
化学性静脉炎	<ul style="list-style-type: none"> ● 沿静脉走向出现条索状红线, 红、肿、热、痛 ● 病人主诉注射部位有尖锐的刺痛和烧灼感 ● 注射部位肿胀 ● 静脉推注有阻力 ● 滴注过程溶液流速突然变慢 	<ul style="list-style-type: none"> ● 药物(如长春瑞滨等)具有很强的刺激性和严重的毒性, 常规静脉给药易出现外渗及静脉炎 	<ul style="list-style-type: none"> ● 立即停止注射给予血管保护 ● 加强健康教育, 给患者讲明药物的性质和可能引起组织坏死 ● 局部进行封闭治疗 ● 根据具体药物选择拮抗剂 ● 选用水胶体敷料德湿可10×10cm, 3天左右更换 	
化疗药物外渗损伤	<ul style="list-style-type: none"> ● 损伤部位出现水疱或者溃疡, 损伤性溃疡一般3-10天发生 	<ul style="list-style-type: none"> ● 化疗药物输注过程中渗出或者渗漏到皮下组织, 引起部分组织坏死, 破溃 	<ul style="list-style-type: none"> ● 未形成溃疡前的水疱: 在严格消毒后用针头在水疱的边缘穿刺, 将水疱的液体抽吸, 贴德湿舒水凝胶敷料, 每3天左右更换 ● 严重外渗伤口破溃的处理: 根据伤口情况选择合适的敷料, 无感染的破溃可用德湿舒, 每3-5天更换 	