

产品特性



德湿威24™
TenderWet24®
德湿威™
TenderWet®

交互式伤口清洁敷料，可清洗伤口并快速主动清创长达24小时。



德湿银™
Atrauman®Ag

含银敷料，有强大的杀菌能力，持续作用3-4天，能杀灭所有的致病微生物，无细胞毒性。



德湿康™
Sorbalgon®


由藻酸钙纤维制成的纯天然无药物敷料，柔软，可将创面的细菌及组织残屑包裹并锁定在凝胶中，帮助伤口迅速止血，并促进愈合。



德湿可™
Hydrocoll®

水胶体敷料，非常薄，为伤口提供湿润的愈合环境，可以保护促进肉芽组织生长和促进上皮爬行。

伤口处理 推荐指南

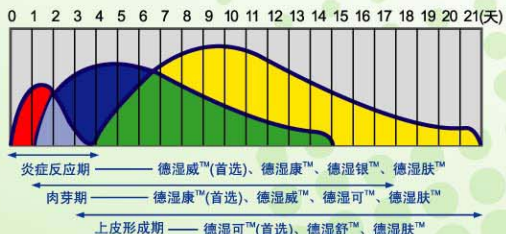

赫曼



伤口敷料选用指南


—— 各期压疮敷料的选用

保赫曼服务信息

服务热线：8008202826

公司网址：<http://www.hartmann.info>

各期压疮敷料的选用

压疮周期	临床表现	处理建议	敷料选用	敷料图例
压疮预防	<ul style="list-style-type: none"> ● 评估压疮风险部位 	<ul style="list-style-type: none"> ● 减压 ● 局部保护 	<ul style="list-style-type: none"> ● 德湿可贴1周，每3-5天更换一次 	
压疮I期	<ul style="list-style-type: none"> ● 红斑（发红）无热烫 ● 表皮和真皮破损 ● 皮肤颜色变深温热，肿胀，皮肤变硬 	<ul style="list-style-type: none"> ● 减压 ● 局部保护 ● 防止进一步受压 ● 观察效果 ● 1周后复诊，局部皮肤完整，渗液性好 	<ul style="list-style-type: none"> ● 德湿可贴1周，每3-5天更换一次 	
压疮II期	<ul style="list-style-type: none"> ● 表皮和真皮破损 ● 浅表表现 磨损，水泡，较浅的腔洞 ● 愈合时间为8.7至38天* 	<ul style="list-style-type: none"> ● 生理盐水清洗 ● 碘伏消毒周围皮肤 ● 选用合适敷料 	<ul style="list-style-type: none"> ● 感染伤口用德湿威清创，感染控制后改用德湿可 ● 清洁伤口直接用德湿可，每5天左右更换一片 	
压疮III期	<ul style="list-style-type: none"> ● 全皮层破损 ● 伤及表皮、真皮和皮下组织，但未损及肌腱 ● 较深的腔洞伴有坏死 	<ul style="list-style-type: none"> ● 评估测量 ● 清创 ● 根据渗液量和颜色选用敷料 ● 调整敷料，至愈合 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用德湿银联合德湿威，德湿银3天左右更换一片，德湿威每天更换，直至感染控制 ● 伤口清洁后换用厚型德湿可每3-5天更换一片 	
压疮IV期	<ul style="list-style-type: none"> ● 全层皮肤破损，更大范围的组织坏死 ● 在肌肉、骨骼和支撑结构处（肌腱，关节处）产生破坏并形成窦道和腔洞 ● III，IV压疮的平均愈合时间为69天* 	<ul style="list-style-type: none"> ● 评估测量：面积，深度，渗液量，颜色，气味 ● 选择清洗溶液和方法 ● 选择清创方法 ● 选择敷料和正确使用，评价调整 ● 检测营养指标，改善营养 ● 准备伤口床，必要时转外科 	<ul style="list-style-type: none"> ● 清创敷料 德湿银+德湿威 控制感染 ● 深部腔隙 德湿银+德湿康 控制感染 ● 伤口清洁后肉芽期改用德湿可，至伤口愈合 	